

ME LUNA



GUÍA DE ASESORAMIENTO Línea shorty

CORTA!

Para cada cuerpo, una copa

Así presentamos una nueva versión de la copa menstrual: ME LUNA SHORTY. No trajimos una copa genérica que homogeneiza lxs cuerpxs y borra las diferencias, sino que decidimos incorporar una nueva línea que está pensada anatómicamente para diversas necesidades.

Con esta campaña arrancamos y le decimos NO al talle único. La vagina es un con-

ducto fibromuscular elástico, representa el lugar de comunicación entre la vulva y el útero y es por donde se escurre la sangre menstrual. Este canal no es fijo y estable: se dilata, se contrae, se extiende (durante el parto, la excitación sexual, el ciclo menstrual). Al igual que nuestrx cuerpx, la vagina cambia. Por eso la hacemos CORTA y decimos: para cada cuerpx, una copa.


¿Cómo es y para quiénes sirve Me Luna Shorty?



La copa menstrual Me Luna Shorty es un centímetro más corta que la versión estándar de Me Luna y está concebida para mujeres con:

- cavidad vaginal muy corta
- orificio del útero muy cerca de la entrada de la vagina (cérvix bajo)
- prolapso uterino
- suelo pélvico muy débil u obesidad
- sin relaciones sexuales con penetración

¿Cómo medir el cérvix?

 <https://youtu.be/F2oVBzZageA>

 <https://www.youtube.com/watch?v=wn6vgO-oNJK>

 *Video aún no subido*


Bajo



Medio



Alto

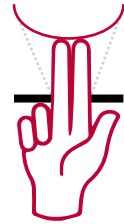


¿Por qué Me Luna Shorty es tan versátil y especial?

El nuevo modelo Me Luna Shorty combina a la perfección las ventajas de una copa menstrual más corta y la mejor capacidad para retener el mayor flujo posible. Gracias a la acotación de un centímetro y la conservación del diámetro en comparación con la versión estándar, Me Luna Shorty adopta una forma cónica que resulta más cómoda para mujeres de baja estatura, descenso de útero o cavidad vaginal corta. Por su forma


cónica y su robustez, y al acortar y conservar el diámetro, Me Luna Shorty se vuelve más compacta y facilita mejor la apertura dentro de la vagina, con lo que se ha comprobado que funciona a la perfección en suelos pélvicos debilitados o también en personas con cierto grado de sobrepeso u obesidad.

La nueva línea de copas Me Luna Shorty ya está disponible en color rojo con agarre de arito, en 3 talles: S, M y L.


Shorty #S

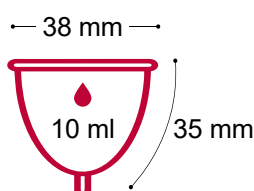

Shorty #M

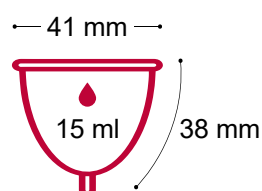

Shorty #L

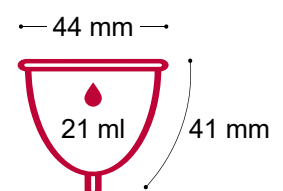

SHORTY S



ME LUNA Shorty Talle S

Me Luna Shorty talle S es la copa menstrual más pequeña del mercado. Si el test Me Luna te sugiere un talle S, y estás dentro de los siguientes grupos, eres usuaria de Shorty S:

- adolescentes que empiezan a menstruar, entre los 10 y los 16 años.
- mujeres de compleción muy pequeña y baja estatura.
- mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales con penetración.
- mujeres con poco flujo menstrual y el suelo pélvico muy bien desarrollado.
- mujeres con descenso de útero.
- mujeres con cavidad vaginal muy corta.
- una combinación de alguno de los anteriores puntos.

¿Cuál es la diferencia entre Me Luna Shorty y Me Luna Soft talle S?

Ambas copas están recomendadas para recibir la menarquía.

Me Luna Shorty talle S es la copa menstrual más pequeña del mercado y tiene la rigidez de la Me Luna Classic.

Me Luna Soft talle S es la más suave y flexible del mercado, pero es 1cm más grande que la Me Luna Shorty.

Ejemplo de asesoramiento: una chica virgen de 12 años menstrúa por primera vez y quiere elegir su primer copa. ¿Qué tener en cuenta para saber si conviene una Me Luna S Shorty o Soft? Si sus temores están vinculados a no perder el himen, a la dificultad en

la manipulación, a que la copa no se abra y tener filtraciones y mancharse, es mejor recomendar una Me Luna Shorty talle S ya que es más corta y rígida; pero si sus temores están vinculados a la sensibilidad, a sentir la presencia de la copa o no, o a que la copa duela al introducirla, es preferible recomendar una Me Luna Soft talle S, ya que es más suave.

En el asesoramiento tenemos que tener en cuenta que el uso de copas menstruales y tampones por primera vez pueden o no dañar el himen.



ME LUNA Shorty Talle M

Me Luna Shorty talle M es una copa relativamente pequeña con tan sólo 38 milímetros de longitud, y con un volumen de 18 milímetros (retiene el doble que un tampón de absorción regular).

Si el test Me Luna te sugiere un talle M, y estás dentro de los siguientes grupos, eres usuaria de Shorty M:

- mujeres con ligero sobrepeso y suelo pélvico poco entrenado o débil.
- mujeres con un descenso leve del útero o cavidad vaginal muy corta.
- una combinación de alguno de los anteriores puntos.

SHORTY L



ME LUNA Shorty Talle L

Me Luna Shorty talle L, con el mismo diámetro que su versión estándar pero con menor longitud, se sostiene mejor en una musculatura pélvica débil, aguanta firme y perfecta y puede desplegarse en la vagina sin problemas y sin producir filtraciones. En los casos de sobrepeso o cierto grado de obesidad, Me Luna Shorty talla L actúa de la misma forma, gracias a su forma cónica y robusta, soporta mejor una presión externa. Eres usuaria de Shorty L si el test Me Luna te sugiere una talla L y estás dentro de alguno de estos grupos:

- mujeres entre 35 y 45 años, con partos vaginales y tendencia a obesidad.
- mujeres con sobrepeso y-o suelo pélvico débil.
- mujeres con prolapso uterino que recorta la longitud de la vagina.
- mujeres con cavidad vaginal corta y menstruaciones abundantes.
- una combinación de alguno de los anteriores puntos.



ME LUNA
ARGENTINA

f [meluna.argentina](#)

@ [melunaarg](#)